


# VivaLIFT!®

## POWER RECLINERS

By Pride® Mobility Products Corp.

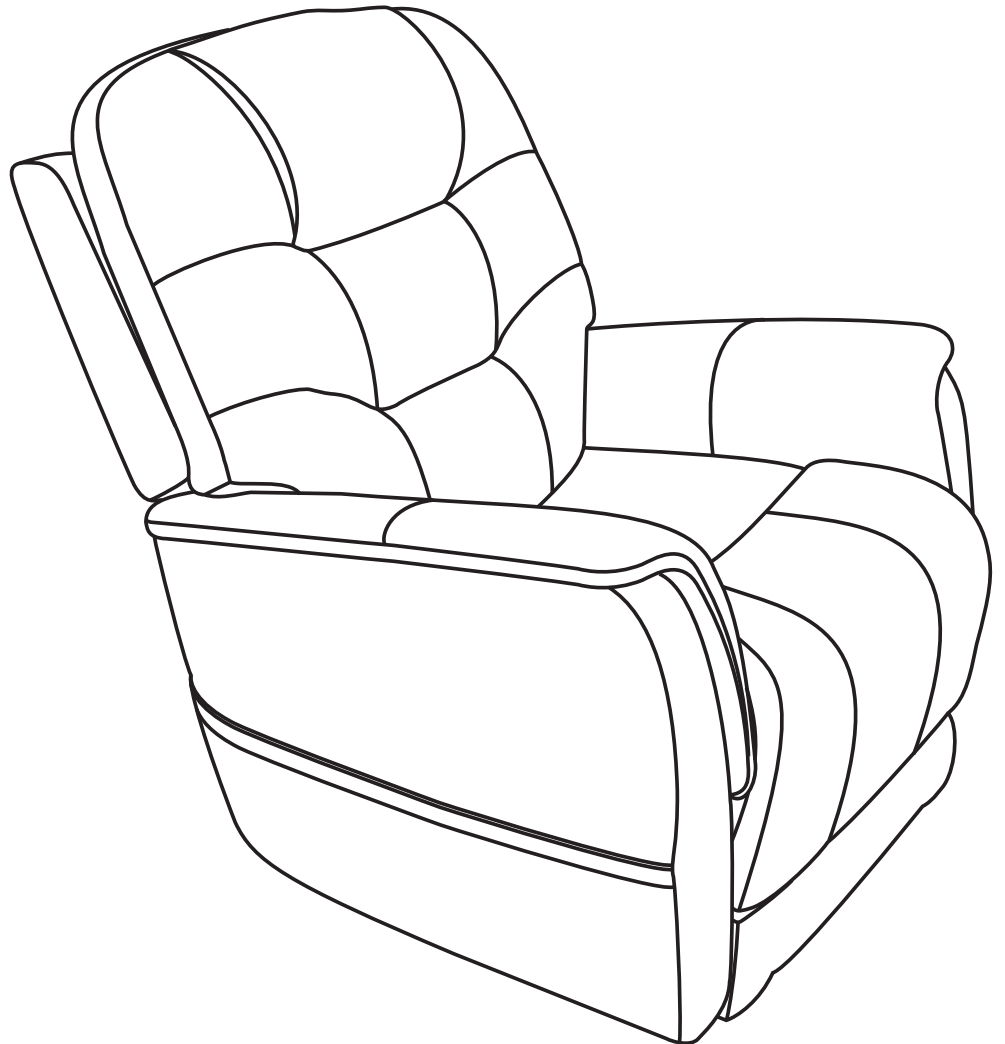

In questo documento sono inclusi: Guida di riferimento per il controllo manuale, cura del tessuto, assemblaggio, garanzia e capacità di peso

**NOTA:** Questa guida di riferimento rapido fornisce informazioni di base sul montaggio, sulle funzioni del filocomando, informazioni sulla garanzia, la portata massima e le istruzioni per la cura della poltrona. Prima di mettere in funzione la poltrona, leggere attentamente il manuale d'uso e tutti gli altri documenti integrativi relativi alla sicurezza, al funzionamento di base e alla cura e manutenzione.

Le illustrazioni riportano i filocomandi con la funzionalità più elevata. I filocomandi che riceverete potrebbero avere un minor numero di opzioni, ma la funzionalità di base è la stessa.

La funzione principale della "VivaLIFT!® power recliner" consiste nella possibilità di regolare il poggiatesta e lo schienale in modo indipendente (solo nelle versioni a due motori), per ottenere la posizione ideale. Per esempio, lo schienale è reclinabile fino a quando non si trova in posizione orizzontale rispetto al suolo. Per farlo, premere e tenere premuto il pulsante "8" (come mostrato nella **figura 1**) fino a quando lo schienale non è completamente reclinato.

### DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PRINCIPALI DEL FILOCOMANDO

#### 1. PORTA USB

Per collegare o caricare tramite USB i dispositivi abilitati.



**AVVERTIMENTO! SOLO cavi certificati MFI DEVONO essere utilizzati durante la ricarica dei dispositivi iPhone. L'uso di qualsiasi cavo non certificato MFI può causare danni al dispositivo o al sistema di ricarica.**

#### 2. PULSANTE "IN" PER POGGIATESTA

Premere e tenere premuto per reclinare il poggiatesta.

#### 3. PULSANTE "OUT" PER POGGIATESTA

Premere e tenere premuto per sollevare il poggiatesta.

#### 4. PULSANTE "IN" PER SUPPORTO LOMBARE

Premere e tenere premuto per disattivare il supporto lombare.

#### 5. PULSANTE "OUT" PER SUPPORTO LOMBARE

Premere e tenere premuto per attivare il supporto lombare.

#### 6. PULSANTE "UP"

Premere e tenere premuto per riportare nella posizione neutra e sollevare la seduta della poltrona.

#### 7. PULSANTE "DOWN"

Premere e tenere premuto per abbassare la poltrona nella posizione seduta o reclinata.

#### 8. PULSANTE "RECLINE" PER SCHIENALE

Premere e tenere premuto per reclinare lo schienale.

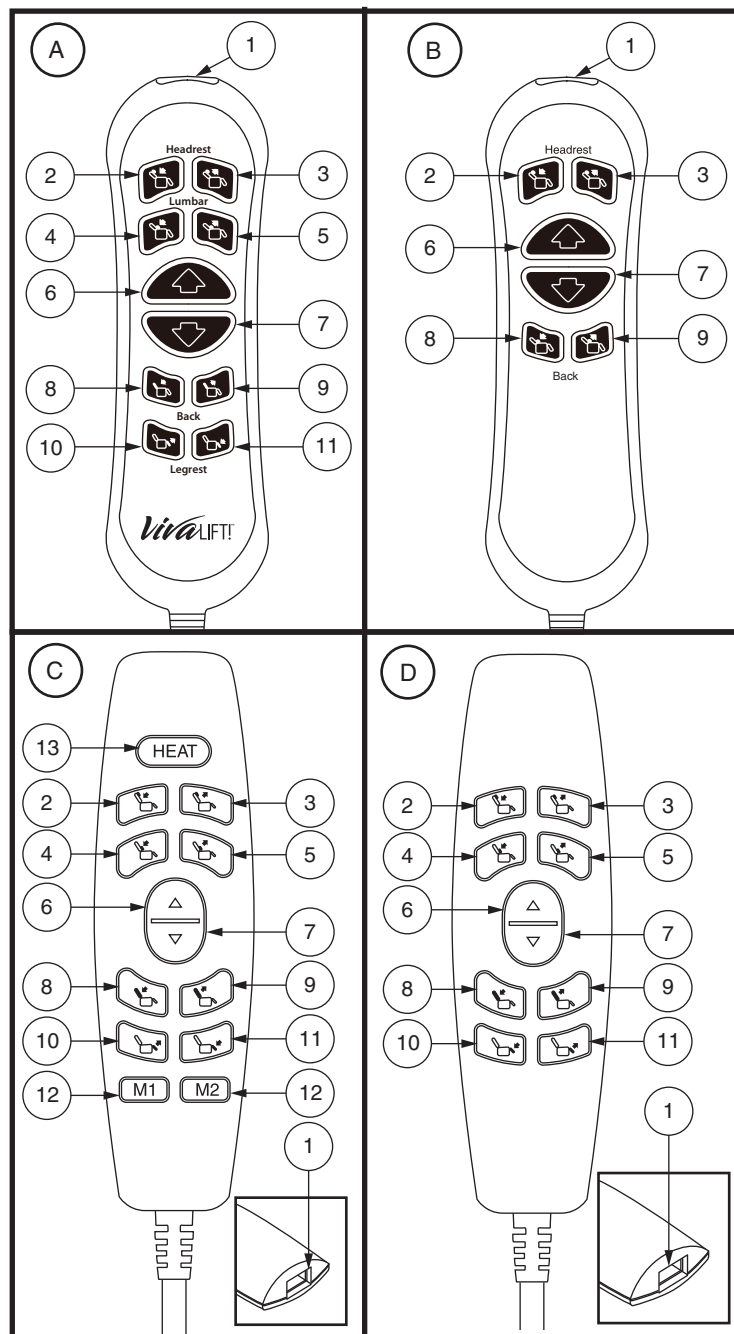


Figura 1. Filocomando

**9. PULSANTE “INCLINE” PER SCHIENALE**

Premere e tenere premuto per sollevare lo schienale.

**10. PULSANTE “UP” PER POGGIAPIEDI**

Premere e tenere premuto per sollevare il poggiatesta.

**11. PULSANTE “DOWN” PER POGGIAPIEDI**

Premere e tenere premuto per abbassare il poggiatesta.

**12. PULSANTI DI MEMORIA (SOLO PULSANTIERA C)**

Tenere premuti il pulsante di memoria 1 e il pulsante di memoria 2. I LED sui pulsanti di memoria lampeggeranno per indicare che la pulsantiera è in modalità “set”. Tenere premuto il pulsante di memoria desiderato per impostare la posizione di memoria. I LED smetteranno di lampeggiare. Per andare a una posizione di memoria preimpostata, tenere premuto il pulsante di memoria desiderato.

**13. PULSANTE DI CONTROLLO DEL CALORE (SOLO PULSANTIERA C)**

Premere il pulsante di riscaldamento per attivare la funzione di riscaldamento. Premere di nuovo il pulsante HEAT per alternare l'intensità tra BASSA, ALTA e OFF.

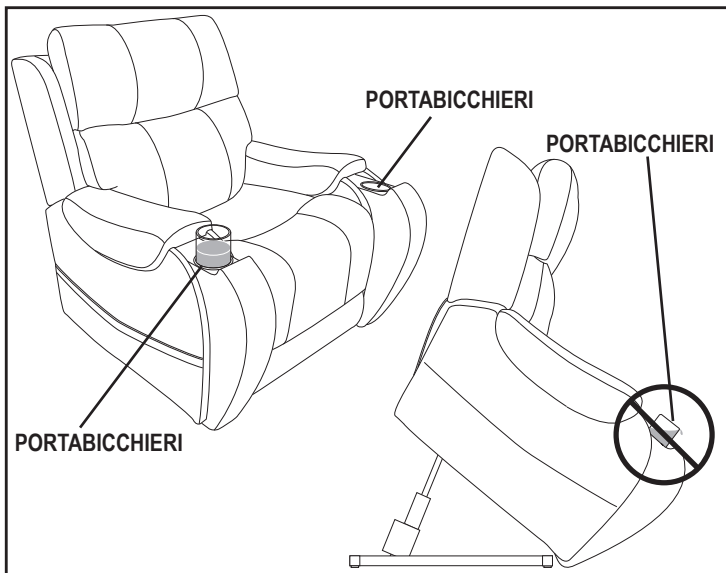


Figura 2. Portabicchieri

**Segui questi passaggi per alzarti correttamente dalla sedia:**

1. Attiva e tieni premuto il pulsante SU (interruttore) per sollevare la sedia.
2. Rilasciare il pulsante (interruttore) quando la sedia raggiunge un'altezza in cui è possibile alzarsi comodamente.

**AVVERTIMENTO!** Non tentare di alzarti in piedi finché non sei in grado di stare in piedi in modo sicuro, sei stabile sui tuoi piedi e puoi sopportare il peso. Pride raccomanda l'uso di ausili di assistenza e/o di un assistente per una maggiore stabilità.



**AVVERTIMENTO!** Evitare di appoggiare tutto il peso sui braccioli della sedia quando si tenta di stare in piedi e non utilizzare i braccioli per sostenere il peso.

Se la tua sedia è dotata di portabicchieri, assicurati che i portabicchieri siano vuoti prima di sollevare la sedia da una posizione seduta in posizione eretta. **Vedi figura 2.**

**AVVERTIMENTO!** Qualsiasi contenuto nei portabicchieri può spostarsi o fuoriuscire quando la sedia viene sollevata. Rimuovere tutto il contenuto prima di sollevare la sedia. La mancata rimozione di tutto il contenuto dai portabicchieri prima di elevare la sedia al di sopra di una posizione seduta può provocare lesioni personali o danni alla proprietà.




**AVVERTIMENTO! NON** posizionare MAI prodotti del tabacco accesi nei portabicchieri né tentare di utilizzare i portabicchieri come posacenere.

### INDICAZIONI PER LA CURA DEI TESSUTI

**NOTA:** Per informazioni complete sulla cura del tessuto, la cura dell'elettronica e lo smaltimento e il riciclaggio, fare riferimento alla sezione Cura e manutenzione del materiale fornito dal proprietario con la sedia.

### MONTAGGIO DELLA POLTRONA


# 1

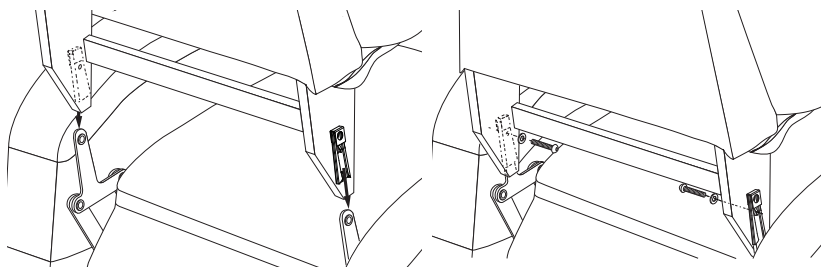

Disimballare la sedia. Posizionare la pulsantiera sulla base della sedia.

Appoggiare la sedia indietro, a faccia in giù, sulla base della sedia e far passare tutti i cavi attraverso il punto di accesso del cavo come mostrato.

# 2

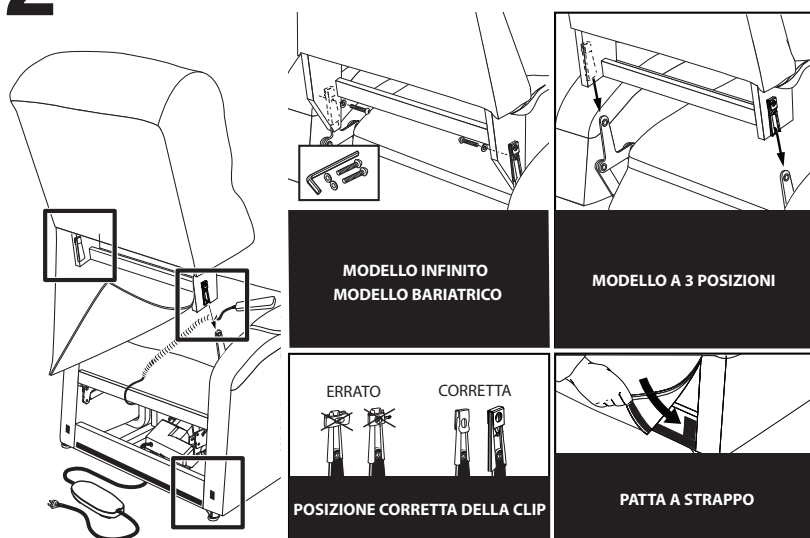

**NOTA:** se la sedia è un modello Infinite, fare riferimento alle istruzioni di montaggio fornite con la sedia. Per il modello a 2 posizioni, le maniche KD si trovano all'interno.

1. Verificare che la clip di bloccaggio sullo schienale della sedia sia in posizione verticale. Riposizionare se necessario.
2. Appoggiare la pulsantiera e il cavo sulla base della sedia, quindi far scorrere lo schienale sulla base. Assicurarsi che il cavo della pulsantiera sia instradato attraverso la parte posteriore della sedia.


**NOTA:** a seconda della larghezza della sedia, potrebbe essere necessario far scorrere su un lato dello schienale alla volta. In tal caso, livellare lo schienale della poltrona prima di premere verso il basso per bloccarlo in posizione.

3. Spingere con decisione sulla parte superiore della schiena per bloccarla in posizione. Devi sentire un clic da ciascun lato della sedia per assicurarti che lo schienale sia bloccato correttamente.

**NOTA:** sollevare lo schienale della sedia per assicurarsi che sia bloccato in posizione.



4. Collegare i connettori lombare e del poggiatesta. Se il tuo modello è Solo poggiatesta, devi solo collegare il poggiatesta.

3

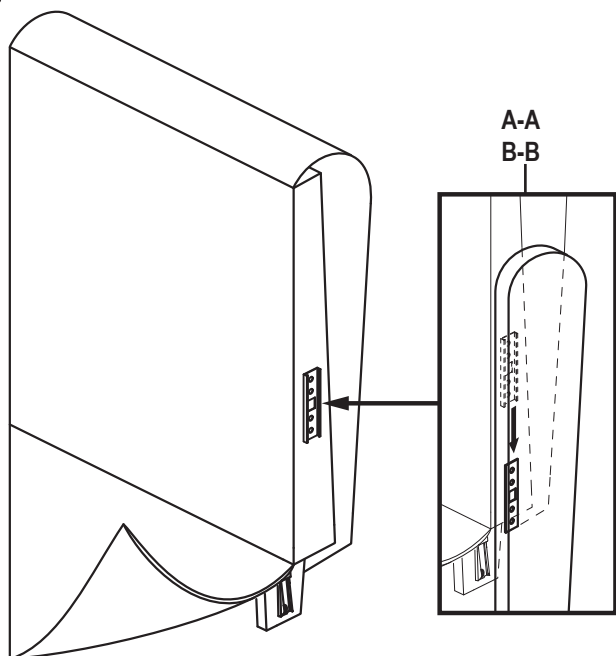

1. Se il tuo modello ha le ali posteriori, allinea le maniche KD e fai scorrere l'ala verso il basso in posizione. Si prega di notare che c'è un'etichetta sulle parentesi. Si prega di assemblarli come indicato (A-A e B-B).
2. Collegare il cavo del trasformatore di alimentazione alla presa corrispondente proveniente dallo schienale della sedia.
3. Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore di alimentazione.
4. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica vicino a dove verrà utilizzata la sedia.

4

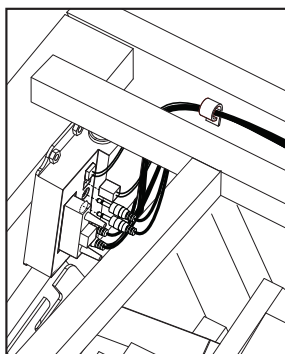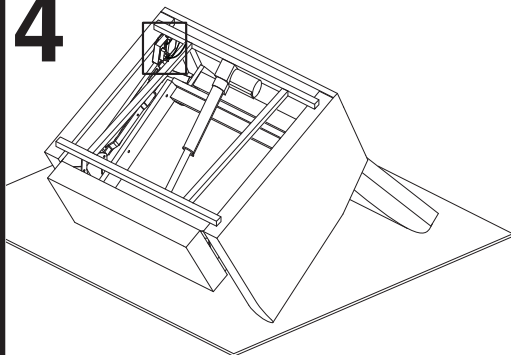


Con la sedia capovolta, individua la scatola di giunzione nell'angolo posteriore. Tirare con cautela i cavi, tenendoli allentati, e collegare prima i tre cavi piccoli. Assicurarsi che tutti i cavi siano fatti passare lungo il telaio della base della sedia e non attraverso il meccanismo e fissare i cavi nei fermagli lungo il telaio interno della sedia.

5

Chiave di identificazione

1. Scatola di controllo

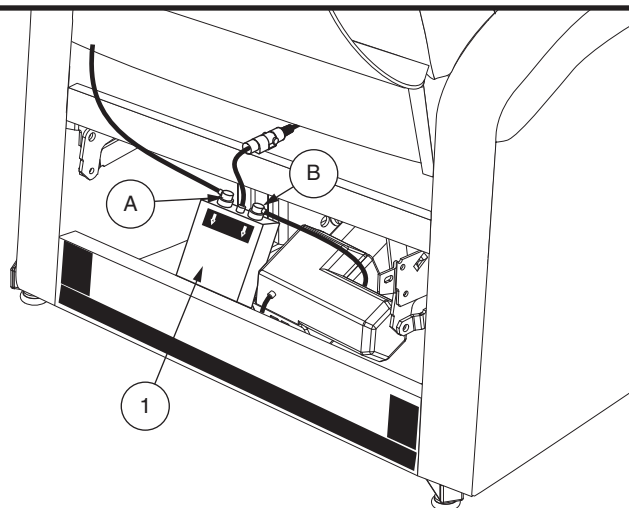


Per le sedie dotate di scatola di controllo, collegare il cavo contrassegnato con "A" alla porta "A" della scatola di controllo e il cavo contrassegnato con "B" alla porta "B" della scatola di controllo. Collegare il cavo del controller al connettore del cavo centrale.

### 6



**SUGGERIMENTO:** Per garantire una consegna di qualità della tua nuova sedia, abbiamo sviluppato un sistema di imballaggio personalizzato per proteggerti da possibili danni che possono verificarsi durante il trasporto e la movimentazione del tuo prodotto. Di conseguenza, i componenti dell'imballaggio utilizzati per proteggere il prodotto potrebbero far apparire deformate le fibre dell'imbottitura al momento del disimballaggio. Nel caso in cui si verificasse questo problema, si consiglia di "sgonfiare" i cuscini della sedia per consentire all'aria di penetrare nelle fibre del cuscino. Questo processo riporterà i cuscini alla loro forma originale.

### 7

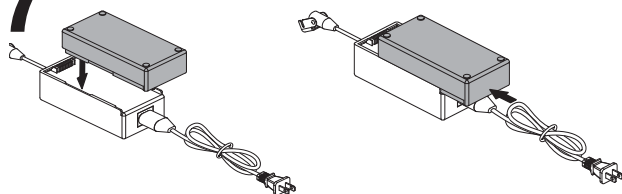


INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

La sedia è dotata di un sistema di backup della batteria agli ioni di litio. Assicurarsi che sia installato correttamente sul trasformatore esterno.

**NOTA:** *caricare completamente la batteria agli ioni di litio prima del primo utilizzo. Il pacco batteria è completamente carico quando l'indicatore LED sul pacco batteria è verde.*


### 8

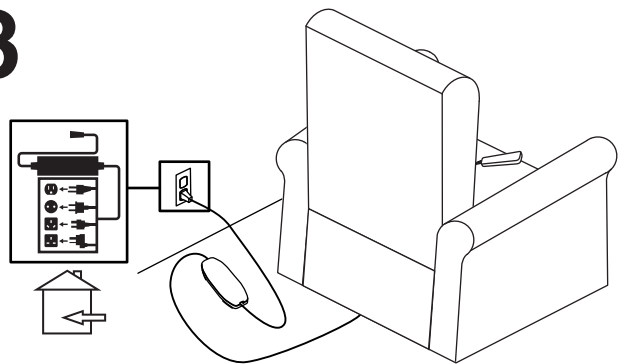

Collegare il cavo di alimentazione proveniente dal trasformatore esterno direttamente in una presa elettrica standard. Instradare il cavo di alimentazione attraverso lo schienale della sedia. Non utilizzare una prolunga.



**AVVERTIMENTO!** Non collegare una prolunga al convertitore AC/DC o al caricabatterie. È possibile utilizzare un limitatore di sovratensione a presa singola omologato UL o riconosciuto UL con un minimo di 1000 joule di protezione. Il limitatore di sovratensione DEVE essere collegato direttamente a una presa elettrica.

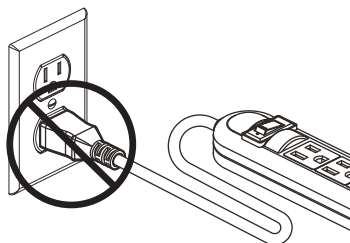

**GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI**

Per due anni dalla data di acquisto, la Pride riparerà o sostituirà a propria discrezione, all'acquirente originario, la parte riscontrata come difettosa, nei materiali e/o nella lavorazione, dopo esame da parte di un rivenditore autorizzato Pride.

**NOTA: Pride si riserva il diritto di sostituire solo la parte che potrebbe essere difettosa, del meccanismo di sollevamento e reclinazione o del telaio della poltrona.**

**ESCLUSIONI DALLA GARANZIA**

Questa garanzia non si estende al tessuto ed all'imbottitura, entrambi soggetti ad usura. Pride non è responsabile o obbligata a pagare per la manodopera, le richieste di assistenza, le spese di spedizione e/o qualsiasi altra spesa sostenuta per la riparazione del prodotto. Tutti i costi di trasporto e i danni verificatisi durante la spedizione delle parti per la riparazione o la sostituzione, sono a carico dell'acquirente. Contattare il rivenditore autorizzato Pride per informazioni sui costi relativi all'intervento dell'assistenza.

- Circostanze non imputabili a Pride
- Spese per la manodopera, richieste di assistenza, spedizione e altre spese sostenute per la riparazione del prodotto, se non specificatamente e precedentemente autorizzate da Pride
- Riparazioni e/o modifiche apportate a qualsiasi parte del prodotto senza l'autorizzazione di Pride

**Inoltre, sono esclusi i danni alle parti causati da:**

- Contaminazione
- Abuso, uso improprio, incidente o negligenza
- Fuoriuscita o perdita del liquido della batteria
- Uso commerciale o altro uso improprio
- Funzionamento, manutenzione o custodia impropri.

La poltrona è stata progettata per la comodità dell'utente. Per informazioni sulla portata, consultare la tabella delle specifiche tecniche qui di seguito. Consultare il manuale utente per ogni ulteriore informazione riguardante la poltrona.

MODELLO	PORTATA
CLASSIC 1 (STL371)	137 kg
CLASSIC 2 (STE371)	158 kg
DELUXE (STL204)	137 kg
DOMINA (STE229)	158 kg
PERFECTA (STE225-HL)	170 kg



**OBBLIGATORIO! Non superare la portata massima specificata per la poltrona. Il superamento della portata massima renderà nulla la garanzia.**





**Rev F/April 2022**



I N F I N I T Y B 3 8 9 2