


Power Glide™

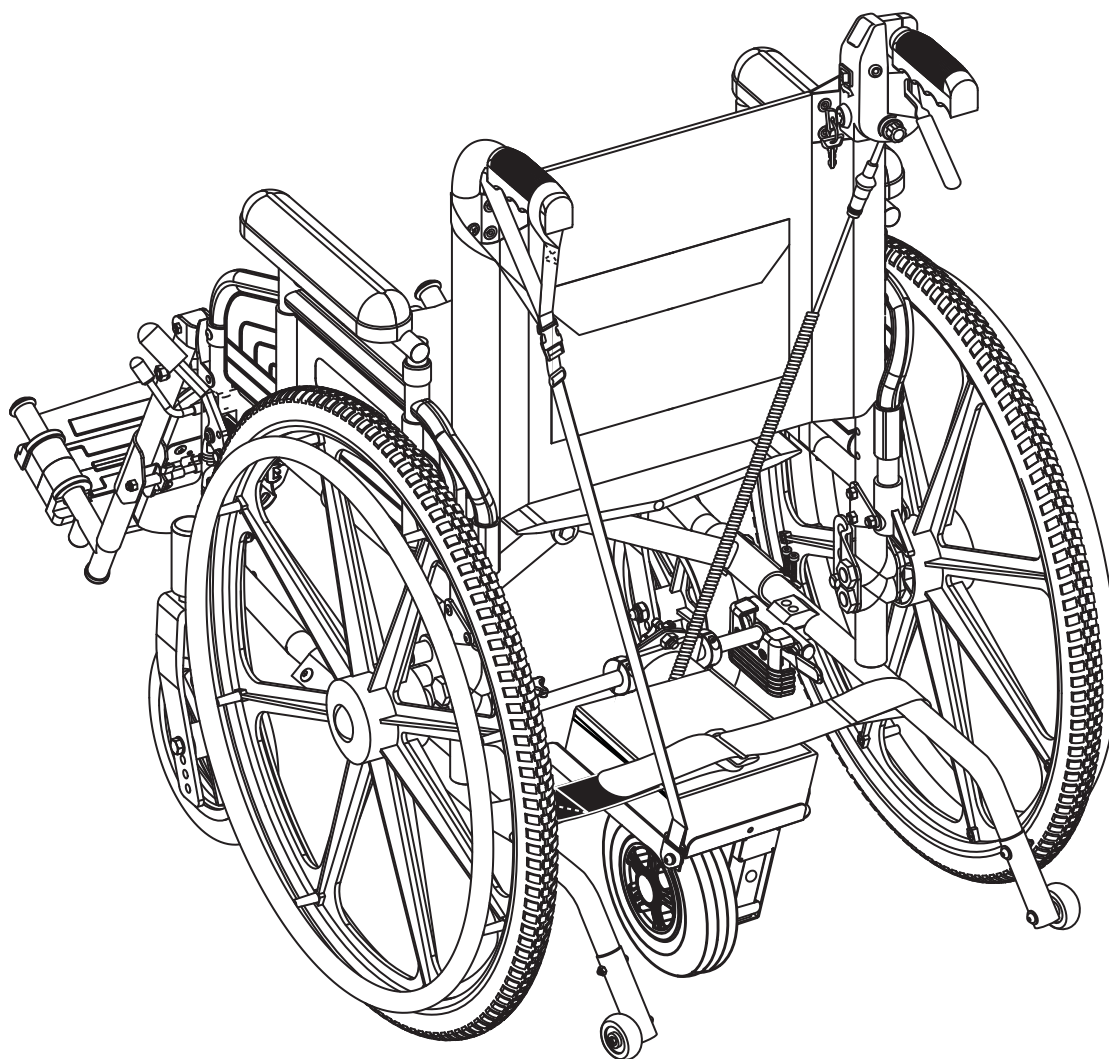

Linee Guida sulla Sicurezza



AVVERTENZA! L'impostazione iniziale di questo prodotto deve essere eseguita da un fornitore autorizzato Pride o da un tecnico qualificato, che dovrà osservare tutte le procedure descritte nel presente manuale.

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati nel presente manuale e sul prodotto per identificare avvertenze e informazioni importanti. È molto importante leggerli e comprenderli completamente.



AVVERTENZA! Indica una condizione/situazione potenzialmente pericolosa. La mancata osservanza delle procedure previste può provocare lesioni alle persone, danni ai componenti o malfunzionamento. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo nero in un triangolo giallo con bordo nero.



OBBLIGATORIO! Queste azioni devono essere eseguite come descritto. La mancata esecuzione delle procedure obbligatorie può provocare lesioni alle persone e/o danni alle apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo bianco in un punto blu con bordo bianco.



PROIBITO! Queste azioni sono proibite. Non devono mai essere eseguite e per nessun motivo. L'esecuzione di un'azione proibita può causare lesioni personali e/o danni alle apparecchiature. Sul prodotto, questa icona è rappresentata da un simbolo nero con un cerchio rosso e una riga rossa.

PROGETTO DI IMPIEGO

L'utilizzo dell'ausilio è da intendersi a beneficio di coloro affetti da deficit della mobilità purché in grado di utilizzare cognitivamente l'ausilio.

UTILIZZO SU PRESCRIZIONE (VALIDO SOLO PER STATI UNITI)



ATTENZIONE! La legge Federale limita la vendita del dispositivo su prescrizione di un medico o altro personale certificato a ciò autorizzato dalla legge dello Stato (solo Stati Uniti d'America) o della regione in cui detto personale è abilitato ad esercitare o a prescrivere l'utilizzo del dispositivo.

NOTA: Il presente manuale per l'utente è redatto sulla base delle ultime specifiche tecniche e sulle informazioni del prodotto, disponibili al momento della pubblicazione. Pride si riserva il diritto apportare modifiche qualora fossero necessarie. Qualsiasi modifica apportata ai nostri prodotti può generare lievi differenze tra le illustrazioni e le spiegazioni contenute nel presente manuale ed il prodotto acquistato. La versione più recente del presente manuale è disponibile sul nostro sito web.

NOTA: Questo prodotto è conforme alle normative e prescrizioni WEEE, RoHS, e REACH.

NOTA: Questo prodotto soddisfa la classificazione IPX4 (IEC 60529).

NOTA: Questo prodotto e le sue componenti sono stati fabbricati in lattice di gomma NON naturale. Per qualsiasi accessorio del mercato post-vendita si prega di consultare prima il produttore.



Etichette Informative	4
Introduzione	6
Power Glide	8
Installazione	9
Funzionamento del Power Glide	12
Batteria e Ricarica	14
Codici Errore	16
Specifiche Tecniche.....	17
Garanzia	18

Simboli di Sicurezza del Prodotto

I simboli che seguono sono utilizzati sul prodotto per identificare le avvertenze, le azioni obbligatorie e quelle proibite. È molto importante leggere e comprendere a fondo i simboli sotto riportati.



Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale per l'utente.



Evitare l'esposizione a pioggia, neve, ghiaccio, sale ed acqua stagnante. Mantenere e conservare in un luogo pulito ed asciutto.



Allontanare strumenti ed oggetti metallici dai terminali della batteria. Il contatto con attrezzi metallici può provocare scosse elettriche.



Tenere i bambini lontano dal prodotto durante la ricarica delle batterie.



Non esporre a sorgenti di calore come fiamme libere o scintille.



Possibili esplosioni!



La batteria contiene sostanze chimiche corrosive.



EMI/RFI - Questo prodotto è stato collaudato ed approvato con un livello di immunità pari a 20 V/m.



I poli della batteria, i terminali e i relativi accessori contengono piombo e composti di piombo. Indossare occhiali e guanti quando si maneggiano le batterie e lavare le mani ad operazioni ultimate..





Non usare batterie con diverse capacità amperora (Ah). Non mischiare batterie vecchie e nuove. Sostituire sempre entrambe le batterie contemporaneamente.



Smaltimento e riciclo – Contattare il rivenditore autorizzato per le corrette procedure di smaltimento e riciclo del prodotto e del relativo imballo.



Caricabatteria solo per uso interno.



Apparecchiatura di Classe II



AVVERTENZA! Non cercare di utilizzare una carrozzina dotata di Power Glide in salita o discesa con pendenza superiore a 3,5% (2°) senza un assistente.

Introduzione

BENVENUTI alla Pride Mobility Products (Pride). Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato dell'arte con sicurezza, comfort e stile. Siamo certi che le caratteristiche del design possano offrire le comodità attese nelle attività quotidiane. La comprensione dell'uso e della cura sicuri del prodotto garantiranno anni di funzionamento e servizio senza problemi.

Prima di utilizzare il prodotto **leggere** ed **osservare** tutte le istruzioni, le avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nei manuali aggiuntivi. La Vostra **sicurezza** dipende dal buon senso dell'utente, del fornitore, dell'assistente o del professionista sanitario.

Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l'utente fornito con la carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile comprensione, oppure in caso sia necessaria assistenza per l'installazione o l'uso, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato Pride. **La mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze e note contenute nel presente manuale e di quelle ubicate sul prodotto può comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia del prodotto stesso.**

Contratto d'acquisto

Accettando la fornitura di questo prodotto, l'acquirente si impegna a non cambiare, modificare o alterare il prodotto, a non rimuovere o rendere inattivi o insicuri dispositivi di protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto, a non rifiutare, dimenticare o mancare di installare i kit di adattamento forniti periodicamente dalla Pride per migliorare o preservare l'uso sicuro del prodotto.

NOTA: In caso di smarrimento della scheda di registrazione del prodotto o del presente manuale per l'utente, è possibile contattare Pride che sarà lieta di inviarne immediatamente uno nuovo.

Il mio rivenditore autorizzato Pride è:

Nome: _____

Indirizzo: _____

Numero di telefono: _____

Data dell'acquisto: _____

Interferenza Elettromagnetica e di Radiofrequenza (EMI/RFI)



AVVERTENZA! Test di laboratorio hanno dimostrato che le onde elettromagnetiche e radio possono influire negativamente sulle prestazioni di veicoli per la mobilità azionati elettricamente.

L'interferenza elettromagnetica e radio può provenire da antenne di telefoni cellulari, radio mobili a due vie (walkie-talkie e CB), emittenti radio-televisive, trasmettitori radio amatoriali (HAM), collegamenti di computer senza fili, microonde e cercapersona e ricetrasmittenti portatili a medio raggio. In alcuni casi, queste onde possono provocare spostamenti involontari o danni al sistema di controllo. Tutti i veicoli per la mobilità azionati elettricamente sono dotati di immunità (o resistenza) alle interferenze elettromagnetiche. Più è alto il livello di immunità, maggiore sarà la protezione delle interferenze elettromagnetiche. Questo prodotto è stato collaudato ed approvato con un livello di immunità pari a 20 V/m.



AVVERTENZA! Ricordare che cellulari, radio mobili a due vie, computer portatili e altri tipi di trasmettitori radio possono provocare movimenti involontari delle apparecchiature elettriche a causa delle interferenze elettromagnetiche. Prestare attenzione durante l'uso di questi apparecchi durante l'utilizzo del prodotto ed evitare di avvicinarsi a stazioni radio e TV.



AVVERTENZA! L'aggiunta di accessori o componenti al veicolo per la mobilità azionato elettronicamente può aumentare la vulnerabilità del veicolo alle interferenze elettromagnetiche. Non modificare in alcun modo l'ausilio senza autorizzazione di Pride.

AVVERTENZA! Il veicolo per la mobilità azionato elettricamente può interferire con le prestazioni di altri dispositivi elettrici vicini, come per esempio sistemi di allarme.

NOTA: Per ulteriori informazioni sulle interferenze EMI/RFI, visitare il sito Web del Resource Center all'indirizzo www.pridemobility.com. In caso di movimento o di rilascio dei freni involontario, spegnere l'ausilio appena ci si trova in condizioni sicure per farlo. Contattare un rappresentante autorizzato Pride per riferire l'incidente.

Power Glide

Il Power Glide è progettato per aiutare un assistente che spinge una carrozzina manuale.

AVVERTENZA! Non utilizzare il Power Glide quando la carrozzina non è occupata.

AVVERTENZA! Verificare che il tasto di accensione e spegnimento sia spento prima che una persona salga o scenda dalla carrozzina.



AVVERTENZA! Non cercare di salire su una pendenza senza l'aiuto di un assistente.

AVVERTENZA! Non cercare di utilizzare una carrozzina dotata di Power Glide oltre i limiti di sicurezza consigliati dal produttore della carrozzina.



AVVERTENZA! Non cercare di utilizzare una carrozzina dotata di Power Glide in salita o discesa con pendenza superiore a 3,5% (2°) senza un assistente.

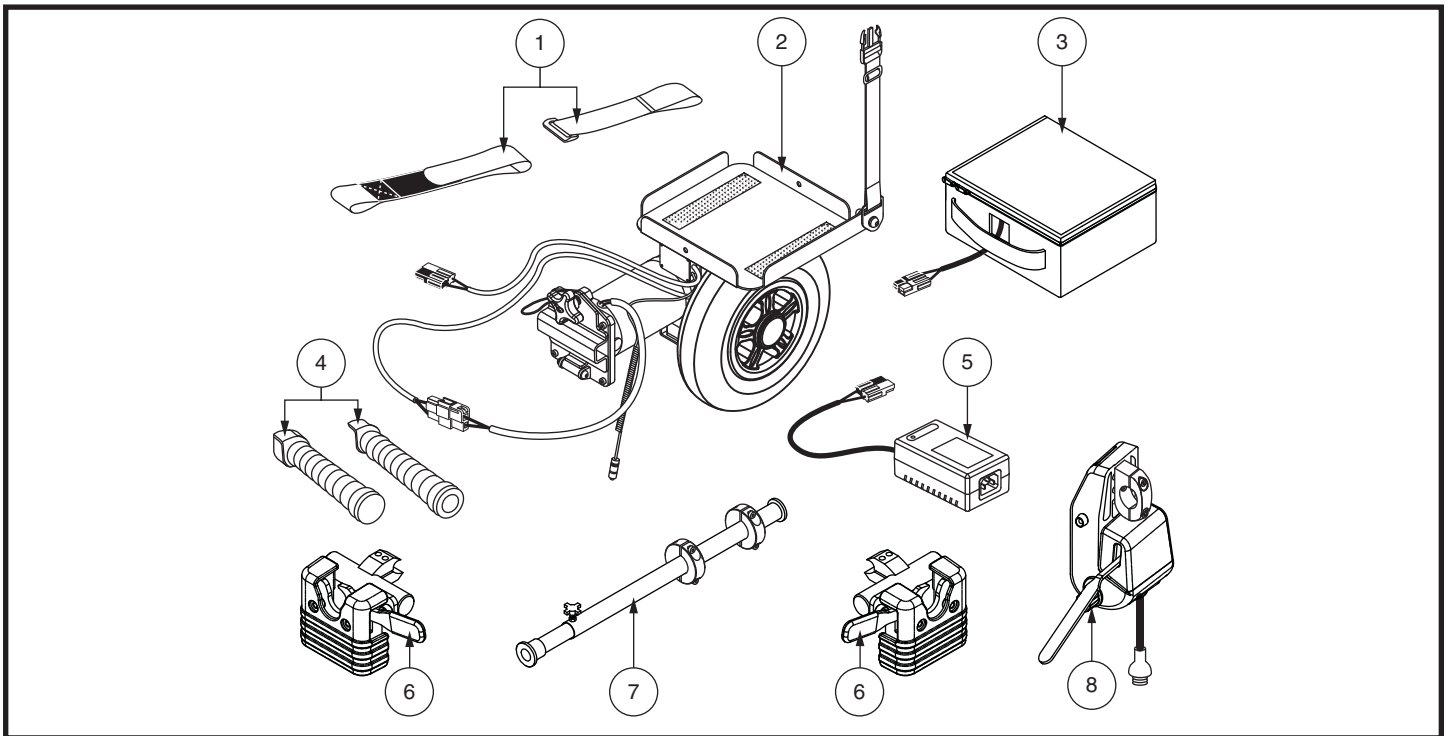


Figura 1. Componenti del Power Glide (nell'illustrazione il modello mono-ruota)

Il Power Glide è composto da (vedere figura 1):

1. Cinghie di contenimento
2. Gruppo elettrico (Alloggio Batteria/Blocco Motore) con cinghia di sollevamento
3. Gruppo batteria
4. Prolunghe manubrio
5. Caricabatteria
6. Supporti di montaggio (nell'illustrazione sinistro e destro)
7. Barra di sostegno orizzontale (comprende grande e piccola)
8. Modulo di comando con supporto

Installazione

Il Power Glide si installa facilmente su qualunque carrozzina di larghezza compresa tra 35,56 e 50,8 cm.

AVVERTENZA! Il Power Glide è pesante. Consultare la tabella delle specifiche tecniche. Se non si è in grado di sollevare il peso, chiedere aiuto. Usare tecniche di sollevamento adeguate ed evitare di superare le proprie possibilità.



AVVERTENZA! Rimuovere sempre prima il gruppo elettrico dalla scatola, poi la batteria. Non rimuovere entrambi insieme poiché la batteria potrebbe scivolare.

AVVERTENZA! Installare sempre prima il gruppo elettrico sulla carrozzina, poi la batteria.



OBBLIGATORIO! Non superare la capacità del peso indicata sul manuale per l'uso della carrozzina, o 136 kg, il valore inferiore. Si ricorda che la capacità di carico massimo include il peso combinato dell'utente e degli accessori eventuali montati sulla carrozzina, compreso il Power Glide.

Osservare i seguenti passaggi per installare il Power Glide su una carrozzina:

1. Verificare di disporre di tutti i componenti illustrati nella **figura 1**.
2. Installare un supporto di montaggio in fondo a ciascun lato del telaio della carrozzina e stringere i bulloni. Mantenere i due supporti di montaggio nella stessa posizione assiale su ciascun lato del telaio. **Vedere figura 2**.
3. Inserire la barra di sostegno orizzontale grande nell'apposito alloggiamento come illustrato nella **figura 3**, e quindi bloccarla insieme alla trasmissione con le quattro (4) viti fornite.

NOTA: *Non stringere la vite principale ad alette in questo momento.*

4. Inserire la barra di sostegno orizzontale piccola in quella grande e regolare la lunghezza in modo che le due barre orizzontali siano ben fissate nei due supporti di montaggio. **Vedere figura 3**.
5. Verificare che i supporti di montaggio siano bloccati.
6. Fissare le barre orizzontali unite con la vite ad alette. **Vedere figura 3**.
7. Verificare che il gruppo elettrico sia in posizione centrale sul telaio della carrozzina.
8. Stringere la vite principale ad alette.

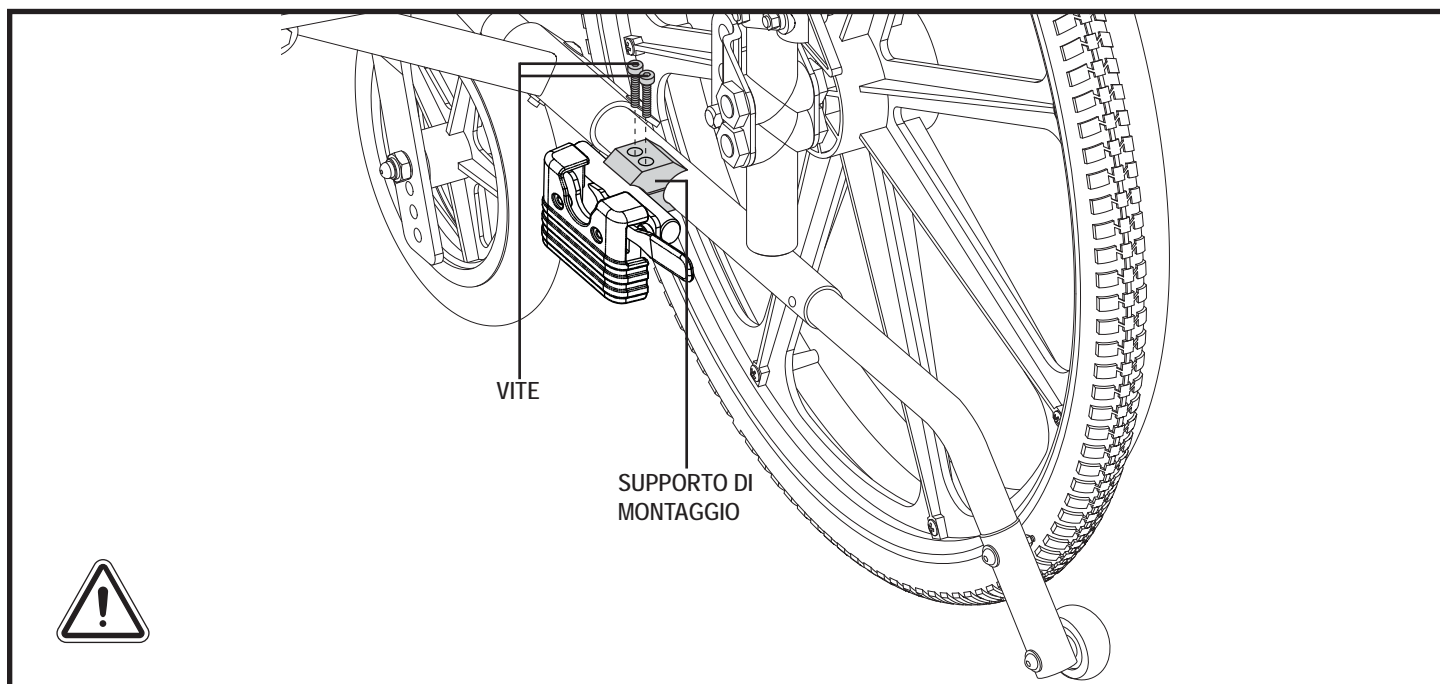


Figura 2. Installazione del supporto di montaggio

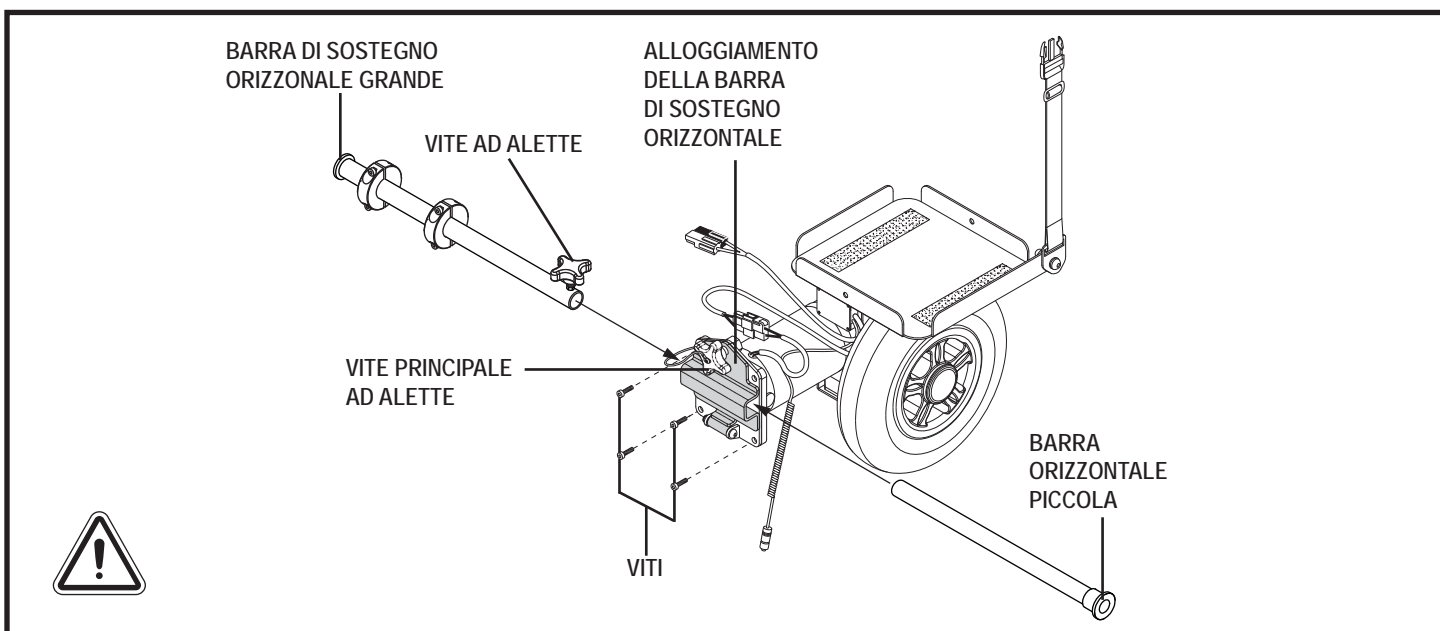


Figura 3. Installazione della barra di sostegno orizzontale (nell'illustrazione il modello mono-ruota)

9. Inserire il supporto del modulo di comando su una delle aste posteriori della carrozzina, verificando che lo schienale non tocchi il supporto della centralina quando è inclinato, se disponibile. Stringere la bulloneria. **Vedere figura 4.**
10. Posizionare il gruppo batteria sul gruppo elettrico. **Vedere figura 5.**
11. Collegare la spina della batteria sul gruppo elettrico alla spina della batteria. **Vedere figura 5.**
12. Dirigere il cavo dal gruppo elettrico lungo lo schienale e collegare la presa del gruppo elettrico al modulo di comando. **Vedere figura 6.**
13. Unire le cinghie di contenimento alla parte inferiore del telaio della carrozzina come illustrato nella **figura 6.**
14. Dirigere le cinghie di contenimento sopra la parte superiore del Power Glide installato e fissarle con ganci riutilizzabili e fissanti.

NOTA: Le cinghie di contenimento non si possono installare su tutti i modelli di carrozzina.

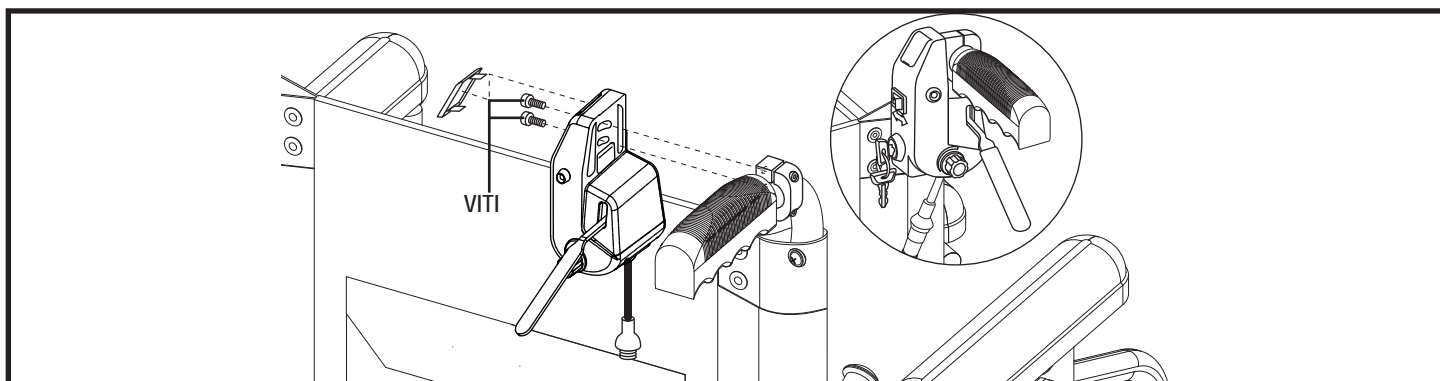


Figura 4. Installazione del supporto della centralina

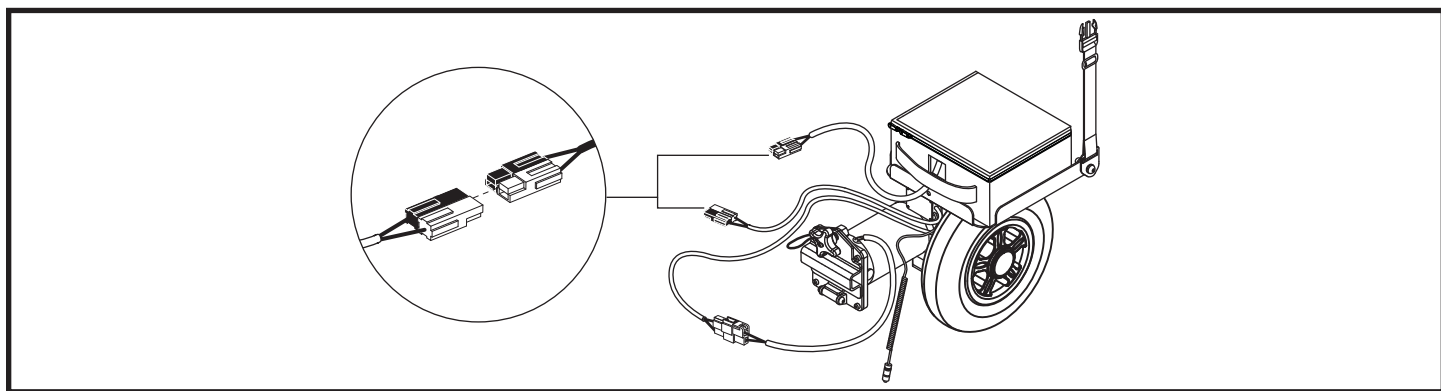


Figura 5. Installazione del gruppo batteria

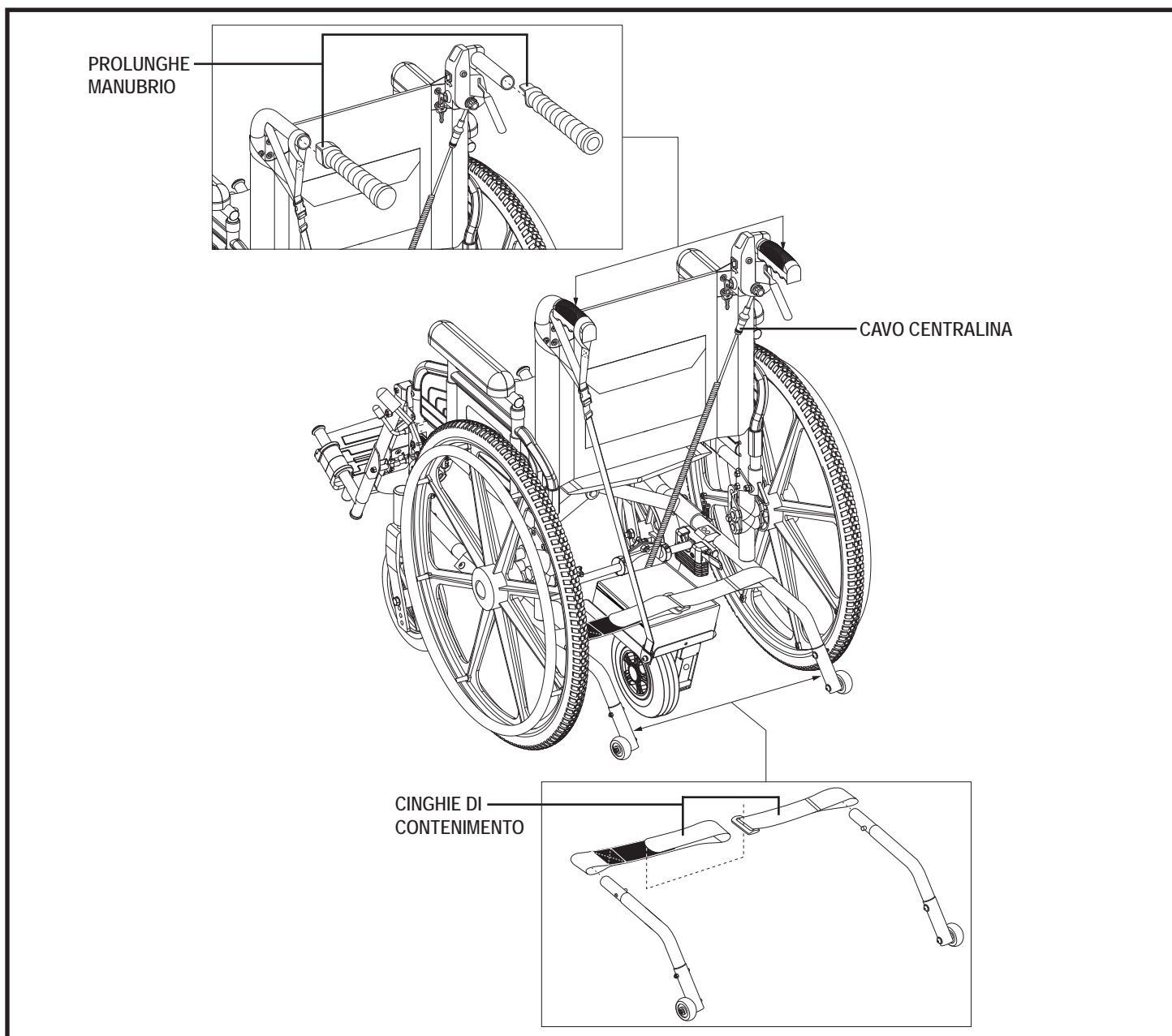


Figura 6. Direzione del cavo della centralina e installazione delle cinghie di contenimento (nell'illustrazione il modello mono-ruota)

Per installare le prolunghe del manubrio:

1. Rimuovere la manopola dall'asta posteriore.
2. Togliere il cappuccino che copre le viti sulla prolunga del manubrio.
3. Allentare le viti.
4. Installare la prolunga del manubrio in modo che il lato piatto della prolunga poggi contro il supporto della centralina. **Vedere figura 4 e figure 6.**
5. Serrare le viti.
6. Reinstallare il cappuccino.
7. Installare la prolunga del manubrio sull'altra asta posteriore seguendo i passaggi sopra riportati.

Funzionamento del Power Glide

La **figura 7** fornisce informazioni sui componenti del modulo di comando del Power Glide. Utilizzare questo diagramma per conoscere la funzione e l'ubicazione di ogni componente prima di usare Power Glide.

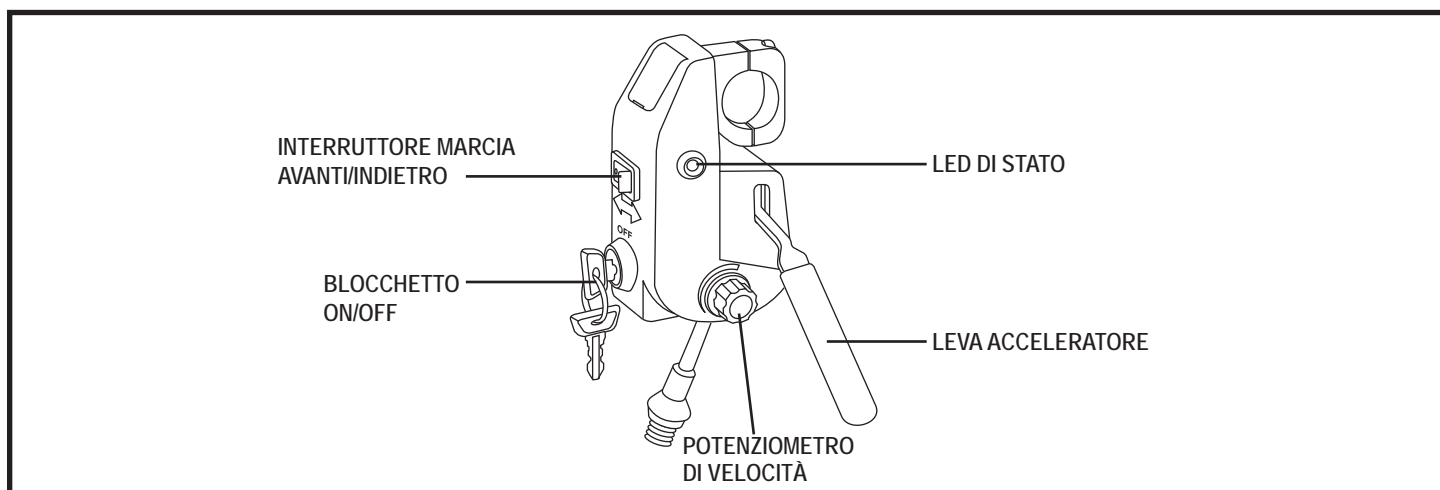


Figura 7. Componenti del modulo di comando

Tasto On/Off

Il blocchetto on/off accende e spegne l'alimentazione del sistema.

NOTA: La carrozzina può essere spinta quando il sistema Power Glide è spento.

LED di Stato

Il LED di stato si illumina quando il tasto di accensione/spegnimento è in posizione accesa e inoltre lampeggia i codici di errore. Vedere "Codice di Errore."

Potenziometro di Velocità

Il potenziometro di velocità controlla la velocità massima del Power Glide. Ruotare il potenziometro di velocità in senso orario per aumentare la velocità massima e in senso antiorario per ridurla.

NOTA: Le prime volte che si usa Power Glide è consigliabile utilizzare l'impostazione minima della velocità, fino a quando non se ne conosce meglio il funzionamento. Selezionare sempre un'impostazione della velocità che corrisponda ad un passo di camminata confortevole.



AVVERTENZA! Non tirare o sollevare le prolunghe del manubrio, se sono installate. Pride consiglia di usare le prolunghe del manubrio solamente per spingere la carrozzina. Controllare periodicamente le viti di installazione per garantire un fissaggio adeguato.

Interruttore Marcia Avanti/Indietro

L'interruttore di marcia avanti/indietro controlla la direzione del Power Glide senza dover girare manualmente la carrozzina o sollevare il Power Glide da terra. Spingere l'interruttore verso la parte anteriore della carrozzina per andare avanti e verso la parte posteriore della carrozzina per andare indietro.

NOTA: La commutazione del Power Glide in retromarcia può causare lo sbalzo del gruppo elettrico. Prestare attenzione quando si passa alla retromarcia.

Leva Acceleratore

La leva dell'acceleratore attiva il Power Glide alla velocità massima impostata dal potenziometro. Tirare la leva dell'acceleratore verso l'alto per attivare il Power Glide.

Batteria e Carica

Il Power Glide usa una batteria a ciclo continuo, a lunga durata da 12 volt. La batteria è sigillata e non necessita di manutenzione. Siccome è sigillata, non è necessario controllare il livello (liquido) elettrolitico. Le batterie a ciclo continuo sono concepite per sopportare voltaggi molto bassi prima della ricarica, anche per lunghi periodi. Sebbene simili nell'aspetto alle batterie da autovettura, non sono intercambiabili con queste ultime. Le batterie delle automobili non sono progettate per gestire un lungo scaricamento completo e sono anche pericolose da usare nei dispositivi per la mobilità.



OBBLIGATORIO! I gruppi batteria, i terminali e gli accessori relativi contengono piombo e composti del piombo. Per maneggiare le batterie indossare occhiali e guanti e lavare le mani ad operazioni ultimate.



ATTENZIONE! Contattare il fornitore Pride autorizzato in caso di domande sulla batteria del Power Glide.

Carica della batteria

Il caricabatterie è essenziale per offrire una lunga durata della batteria. Il caricabatterie è progettato per ottimizzare le prestazioni del Power Glide caricando la batteria in modo sicuro, rapido e semplice. Il caricabatterie funziona solo quando il cavo di alimentazione del caricabatterie è collegato a una presa elettrica.

La batteria può essere sottoposta a sbalzi di temperatura che influiscono sulle sue prestazioni. Il calore estremo diminuisce la carica della batteria; il freddo estremo rallenta l'erogazione di elettricità e prolunga il tempo necessario per la ricarica. Mantenere la batteria completamente carica quando è possibile e proteggerla dal caldo e dal freddo estremo.



AVVERTENZA! Proteggere sempre la batteria dal congelamento e non caricare mai una batteria congelata.



AVVERTENZA! Possibili esplosioni!



AVVERTENZA! La batteria contiene sostanze chimiche corrosive.



OBBLIGATORIO! Per ridurre il rischio di perdite di liquido o condizioni di esplosione, usare solamente batterie AGM o gel.



PROIBITO! La rimozione dello spinotto di messa a terra può causare scossa elettrica. Se necessario, installare correttamente un adattatore autorizzato a 3 spinotti in una presa elettrica con accesso per spina a 2 spinotti.



PROIBITO! Non collegare una prolunga elettrica al convertitore CA/CC o al carica-batterie.



PROIBITO! Tenere i bambini lontano dal prodotto di mobilità durante la ricarica delle batterie.



PROIBITO! Non esporre a sorgenti di calore come fiamme libere o scintille.



PROIBITO! Se possibile, evitare l'esposizione a pioggia, neve, ghiaccio, sale ed acqua stagnante. Mantenere e conservare in un luogo pulito ed asciutto.



OBBLIGATORIO! Caricabatteria solo per uso interno.



OBBLIGATORIO! Leggere le istruzioni per la ricarica della batteria contenute nel presente manuale ed in quello fornito con il caricabatterie prima di caricarle.

Osservare questi passaggi per caricare Power Glide (vedere figura 8):

1. Collocare la carrozzina dotata di Power Glide accanto ad una presa elettrica standard.
2. Scollegare dal motore il connettore bianco e nero del caricatore che parte dal gruppo batteria.

NOTA: Il caricabatteria è dotato di un LED che indica alimentazione e stato della carica. Un LED rosso indica alimentazione, un LED arancione indica ricarica attiva in corso e un LED verde indica che la batteria è completamente carica.

3. Collegare la struttura del caricatore ai connettori bianco e nero sul cavo di alimentazione che parte dal gruppo batteria, quindi inserire la spina a 3 spinotti in una presa elettrica.
4. Quando la batteria è completamente carica (si illumina un LED verde), scollegare il caricatore dalla presa elettrica e quindi dal gruppo batteria.

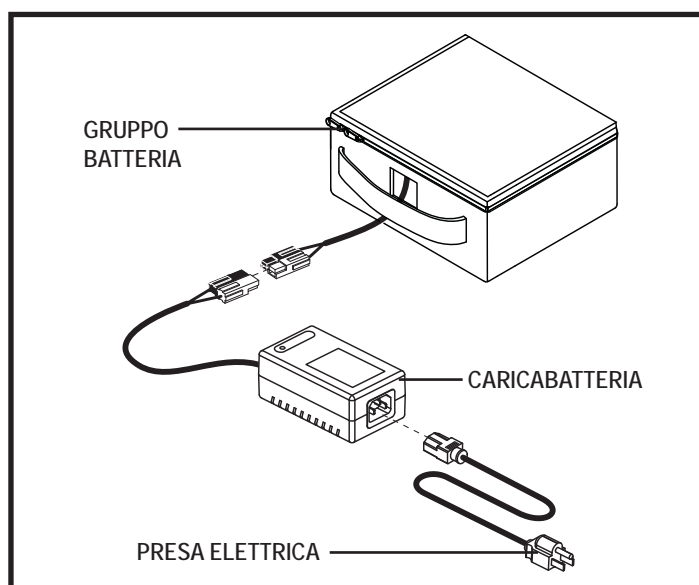


Figura 8. Carricamento della batteria

Sostituzione della batteria



OBBLIGATORIO! I gruppi batteria, i terminali e gli accessori relativi contengono piombo e composti del piombo. Per maneggiare le batterie indossare occhiali e guanti e lavare le mani ad operazioni ultimate.



AVVERTENZA! Sostituire sempre la batteria con altra dello stesso tipo, stessa composizione chimica e capacità amperora (Ah). Consultare la tabella delle specifiche tecniche contenuta nel presente manuale ed in quello fornito con il caricabatteria per il tipo e le capacità raccomandate.

Per riposizionare la batteria nel gruppo corrispondente:

1. Scollegare il gruppo batteria dal gruppo elettrico. **Vedere figura 5.**
2. Aprire il gruppo batteria.
3. Scollegare i cavi della batteria dai terminali e rimuovere la batteria.
4. Posizionare una batteria nuova nel gruppo apposito.
5. Collegare i cavi della batteria: filo rosso al terminale positivo (+) e filo nero a quello negativo (-).
6. Chiudere il gruppo batteria.
7. Ricollegare il gruppo batteria al gruppo elettrico. **Vedere figura 5.**

Codici Errore

L'indicatore al LED lampeggerà i relativi codici di errore ogni qualvolta il Power Glide individui una anomalia all'interno del circuito elettrico. L'indicatore al LED continuerà a lampeggiare fino a quando il problema non sarà risolto. La tabella seguente identifica i singoli codici errore. In caso si rilevino questi codici errore, oppure altri problemi, contattare il proprio rivenditore autorizzato Pride.

Codice di Errore	Natura del Problema	Impatto	Soluzione del Problema
1	La batteria deve essere ricaricata	Guida rallentata	La batteria è quasi scarica. Caricare la batteria appena possibile.
2	Tensione della batteria troppo bassa	Guida inibita	La batteria è completamente scarica. Ricaricare la batteria.
3	Tensione della batteria troppo elevata	Guida inibita	La carica della batteria è troppo elevata. Una ricarica eccessiva può causare questo guasto. Controllare le connessioni della batteria.
4	Tempo limite attuale finito	Guida inibita	Il dispositivo ha utilizzato troppa corrente per troppo tempo, probabilmente a causa di un motore in corto circuito. Spegnerlo il dispositivo per alcuni minuti, quindi riaccenderlo. Controllare che il motore non sia in corto circuito. Contattare il rivenditore autorizzato Pride se il problema persiste.
7	Errore del potenziometro acceleratore/velocità	Guida inibita	Il cablaggio può essere difettoso. Contattare il rivenditore autorizzato Pride.
9	Errore interno	Guida inibita	Contattare il rivenditore autorizzato Pride.

SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità massima ¹	Fino a 5,5 km/h
Autonomia ^{1, 4}	Fino a 16 km
Trazione	Motore singolo
Batterie ³	Una da 12 volt, a ciclo continuo 17 Ah
Caricabatterie	1,5-amp, esterno
Ruote motrici	203,2 mm, piene
Capacità di carico massima	136 kg
Ingombro totale ²	Altezza: 245 cm Lunghezza: 300 mm Larghezza: 200 mm
Peso singoli componenti ⁵	Modello a due ruote: 7,7 kg Batteria: 6,8 kg

- 1 Variabile a seconda del peso dell'utente, della tipologia del fondo stradale, dello stato di carica e di usura della batteria, e delle condizioni dei pneumatici. Le misure possono variare fino a +/- 10%.
- 2 A causa delle tolleranze di produzione e al continuo miglioramento del prodotto, le presenti specifiche tecniche possono essere soggette ad una variazione pari a (+ /-) 3%.
- 3 Di tipo di AGM o di tipo al gel a richiesta. Vedere "Batterie e carica".
- 4 Testato in conformità con ANSI/RENA WC Vol. 2, punto 4 e le norme ISO 7176-4. Risultati ottenuti da calcoli teorici basati sulle specifiche della batteria e sulle prestazioni del sistema di guida.. Test effettuati alla capacità di massima portata.
- 5 Il peso della batteria può variare a seconda del produttore.

NOTA: Il prodotto è conforme ai requisiti ANSI-RESNA ed agli standard ISO 7176 serie EN12183 un EN12184. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Garanzia

Per due (2) anni dalla data di acquisto, la Pride riparerà o sostituirà a propria scelta all'acquirente originario, gratuitamente, qualunque parte riscontrata come difettosa nei materiali e/o nella lavorazione, dopo esame da parte di un rivenditore autorizzato Pride.

Garanzia Limitata di sei Mesi

- Batteria

La batteria è coperta da una garanzia di sei mesi separata, fornita dal produttore della batteria. La batteria non è garantita da Pride.

Esclusioni Dalla Garanzia

- Pneumatici (soggetti ad usura)
- Circostanze al fuori del controllo di Pride
- Manodopera, chiamate di assistenza, spedizione e altri costi derivanti dalla riparazione del prodotto, se non specificamente autorizzati da Pride.
- Riparazioni e/o modifiche eseguite a componenti senza consenso specifico di Pride.

L'esclusione comprende anche componenti danneggiati da:

- Contaminazione
- Abuso, uso improprio, incidente o negligenza
- Versamento o perdita di liquido della batteria
- Uso commerciale o diverso da quello previsto
- Uso, manutenzione o conservazione impropri

NOTA: Il deterioramento graduale delle prestazioni dovuto ad una condizione di mancata ricarica, ad esposizione prolungata al freddo o all'usura da uso frequente non è coperto da garanzia.

Parti di Ricambio

La disponibilità di parti di ricambio è soggetta alla discrezione del fornitore e non del produttore. Non restituire parti difettose alla Pride senza previo consenso scritto. Tutti i costi di trasporto e i danni di spedizione incorsi durante l'invio delle parti per la riparazione o la sostituzione sono responsabilità dell'acquirente.

La mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze e note contenute nel manuale per l'utente ed applicate sul prodotto Pride può comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia del prodotto Pride.

Non esiste altra garanzia esplicita.

Garanzie Implicite

Le garanzie implicite, comprese quelle di commercializzazione e idoneità per uno scopo particolare, sono limitate a due (2) anni dalla data di acquisto e secondo i limiti previsti dalla legge. È esclusa qualunque possibile garanzia implicita. Questo è il rimedio esclusivo. Sono escluse responsabilità per danni conseguenti coperti da qualunque possibile garanzia.

Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita e non permettono l'esclusione di limiti di danni incidentali o consequenziali. Pertanto la limitazione o esclusione di cui sopra può non essere applicabile.

La presente garanzia dà all'utente diritti specifici e potrebbero esserne altri che variano da uno stato all'altro.

USA

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pridemobility.co.uk

B.V.

(authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 Ms Enkhuizen
The Netherlands
www.pridemobility.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pridemobility-italia.it

France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.pridemobility.fr

Spain

Calle Velazquez 80 6D
28001 Madrid

www.pridemobility.com
1-800-800-8586 (US)

